



Hegenberger

ヘゲンベルガー レトラクター

より良い分娩後縫合のために



エム・シー・メディカル株式会社


Hegenberger

ヘゲンベルガー レトラクター

- 会陰裂傷部縫合のための視野確保
- 術後の患者のQOL向上への期待*
- 縫合のための介助者が不要
- 縫合時間の短縮の可能性*
- 針刺し事故のリスク低減*




視認性の向上

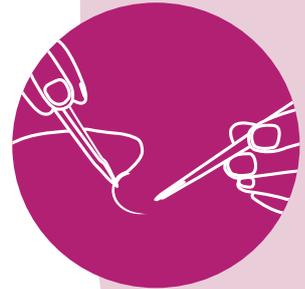


縫合の補助




患者のQOL向上

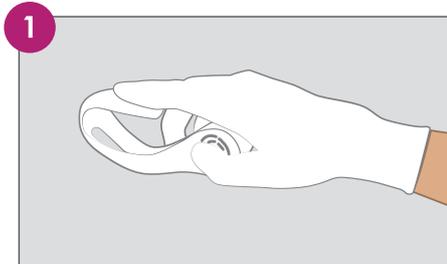


1 画像のようにレトラクターを持ってください。

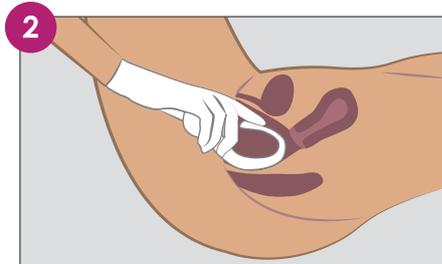


2 膣に挿入するときは、レトラクターの側面を押さえながら挿入してください。潤滑剤を使用しないでください。

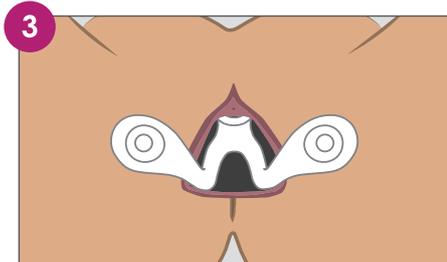

3 レトラクターがこの図より奥に配置されていないことを確認してください。

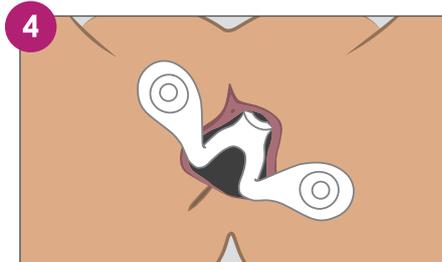

4 会陰切開部を展開しやすい位置にレトラクターを配置してください。

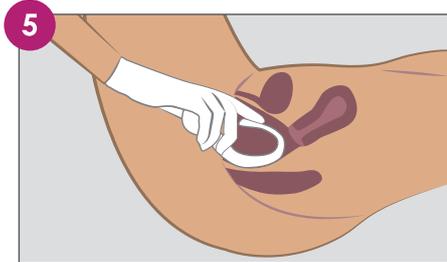

レトラクターの抜去

レトラクターの両側を同時に閉じ、人差し指を使用して、レトラクターの上部が子宮頸部から確実に離れるようにします。レトラクターの上部を押し下げ、膣からレトラクターをゆっくりと取り出してください。

製品番号

HGA1390-10

数量

10個/箱

仕様

滅菌済

医療機器届出番号：13B1X000880HG001
販売名：Hegenbergerレトラクター

* 文献元：MIDIRS Midwifery Digest 32:4 2022

題名：Midwives' perceptions of the Hegenberger Retractor for perineal repair following online clinical training: a mixed methods study Darya Kozlyk, Malene Hegenberger

題名：Clinical evaluation of the Hegenberger Retractor for perineal repair: an evaluation of clinicians' experience Darya Kozlyk

製造販売元



エム・シー・メディカル株式会社

〒108-0075 東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー12階 TEL: 03-5715-2800 FAX: 03-5715-2801
information@mcmed.co.jp



00000000